

**Produktname:** TAEWHALON ECO Mask => ECO M TWL

FFP2 NR nach EN 149:2001 + A1:2009

#### Anwendung

1. Prüfen Sie, dass die Maske nicht verschmutzt ist.
2. Platzieren Sie die Maske über Mund und Nase und die Ohrschlaufen hinter die Ohren.
3. Drücken Sie den Nasenbügel fest an den Nasenrücken.
4. Stellen Sie sicher, dass die Maske dicht anliegt. An den Rändern darf keine Luft ein- oder austreten.

#### Hinweise

1. Nicht verwenden in geschlossenen Räumen mit einem Sauerstoffgehalt von weniger als 18%.
2. Nicht verwenden, wenn die Innenseite der Maske kontaminiert ist.
3. Die Masken sind **NICHT wieder verwendbar**.
4. Offensichtlich verschmutzte Masken sollten nicht weiterverwendet werden.
5. Personen, die Atemprobleme durch Tragen der Maske feststellen (z.B. Schwangere, Patienten mit Kardiovaskulären- oder Atemwegsproblemen, Senioren oder Kinder) sollten die Verwendung beenden und einen Arzt aufsuchen.

#### Einsatzzweck

Schutz der Atemwege vor gefährlichen Partikeln und infektiösen Quellen (z.B. gelber Staub und Feinstaub)

#### Lagerung

Lagerung bei Zimmertemperatur (1~30°C) in der verschlossenen Verpackung bei max. 70% Luftfeuchtigkeit.

#### Warnung

Gesichtsbehaarungen vermindern die Dichtigkeit der Maske.

Nicht zum Schutz gegen Gase geeignet.

Maske in kontaminierten Bereichen nicht entfernen.

#### Symbole



Die Hersteller- informationen sind zu beachten	Verwendbar bis JJJJ.MM.TT Lot Nr.	Zulässiger Temperatur- bereich bei Lagerung	Zulässige relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
--	---	--	--

#### Hersteller:

TAEWHALON Co., Ltd.  
80, Yeongji-gil, Daechang-myeon, Yeongcheon-si,  
Gyeongsangbuk-do, Republik Korea,  
Tel. +82-53-853 9566

#### Notifizierte Stelle: CE 2233

GEPTESZT Termelőszközökét Felülvizsgáló és Karbantartó Kft.  
Jablonka ul.79, 1037Budapest, Ungarn

#### Importeur:

PTN Healthcare GmbH  
Am Kronberger Hang 2, 65824 Schwalbach, Deutschland  
info@ptn-healthcare.de

#### Link EU-Konformitätserklärung:

<http://ptn-healthcare.de/respiratormask.html>